



Оптимальные фотографии для Crisalix Face

Crisalix создает 3D модель лица пациента на основе обычных цифровых фотографий. Для достижения наилучших результатов рекомендуем придерживаться следующих правил:

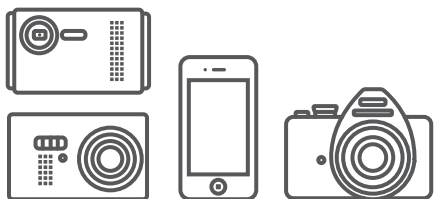

КАМЕРА


Вы можете использовать любой цифровой фотоаппарат, iPad или смартфон.

 Рекомендуем использовать вспышку для избегания теней и «расплывчатости».



ДИСТАНЦИЯ

Камера должна быть расположена на уровне лица. Фотографии делаются с расстояния 2 метров. Можно использовать приближение, чтобы лицо занимало около 60% всего снимка.

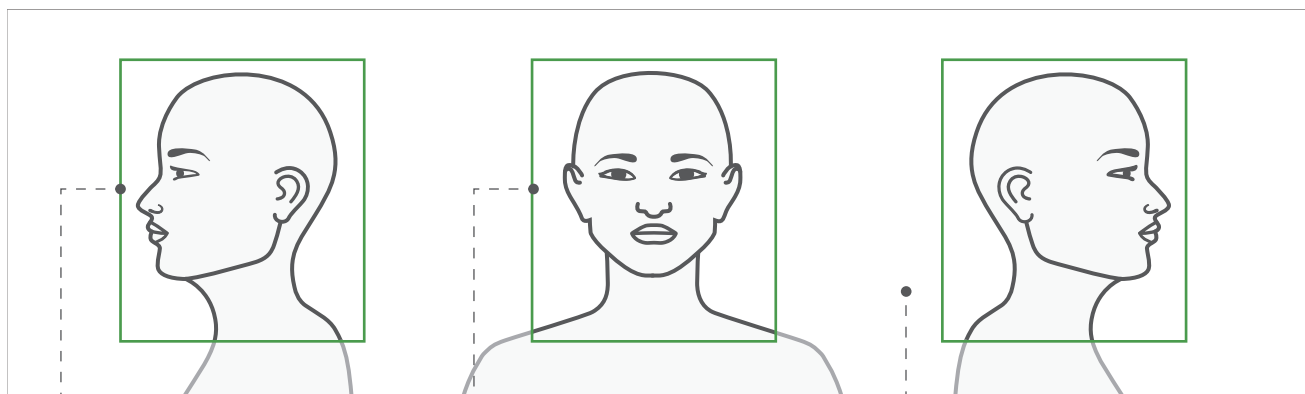

ПРОФИЛЬ

Щека должна быть расположена **в центре фото**.

Избегайте поворота шеи или головы, все тело должно быть повернуто на 90°


АНФАС

Нос **находится в центре фотографии**.


Волосы должны быть забраны, чтобы оба уха были хорошо видны.

Однородный задний фон, идеально белого цвета.


РЕКОМЕНДАЦИИ

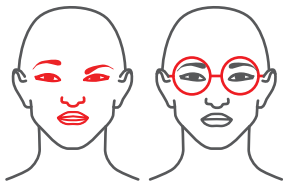

Нейтральное выражение лица. Открытые глаза без очков.

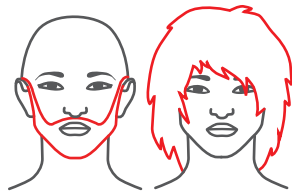

Отсутствие волос, закрывающих лицо.

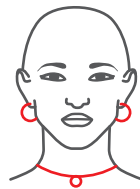

Украшения должны быть сняты.



Шея должна быть открыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Цветные фотографии с хорошим одинаковым освещением.



Фотографии в формате "Портрет", камера расположена вертикально.





Фотографии должны быть сохранены в формате JPEG



700 px

700 px
Минимальное разрешение - 700 пикселей.

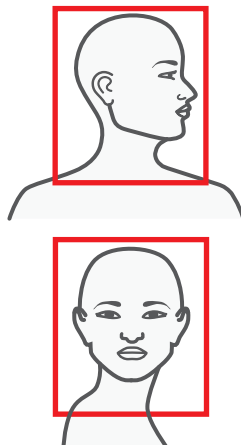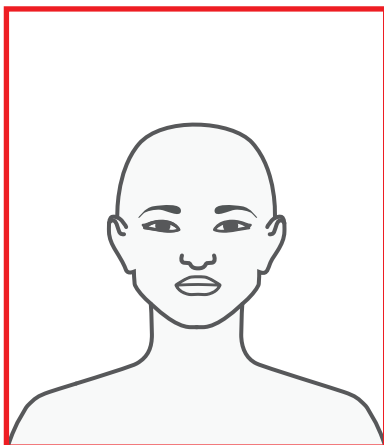

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОТО

Шея не должна быть повернута. Лицо не должно быть сфотографировано слишком далеко или близко.